

BEDIENUNGSANLEITUNG IP VIB 40-1-



IP Division GmbH Pfarrstr.3 85778 Haimhausen
Tel:08133-444951 Fax:08133-444953
E-Mail:info@ipdent.de www.ipdent.de

Bedienungsanweisungen IP Rüttler Vib 40-1-

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Sich nach dem Auspacken über die Ganzheit des Gerätes und seines Zubehörs vergewissern.
- Vor Anschließen des Gerätes sich darüber vergewissern, dass die Daten des Typenschildes mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Das Stromkabel an eine den europäischen Vorschriften oder den Vorschriften des Landes, in dem es verwendet wird entsprechende Steckdose anschließen.
Der Stromabnehmer muß unbedingt über den Erdungskontakt verfügen.

ACHTUNG

- Das Gerät nicht verwenden, falls es Schäden an den Kabeln oder am Stecker aufweist.
- Das Gerät ausschließlich innerhalb von Räumen anwenden, die Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee usw. nicht ausgesetzt sind.

Bedienungsanweisungen

- > Rüttler an Netzstecker anschließen.
- > Einschalten (1)
- > Gewünschte Leistung einstellen (1)

Wartung

Rütteltisch gelegentlich reinigen, keine Lösungsmittel oder Alkohol verwenden.
Weitere Wartungsvorgänge sind nicht nötig.

Technische Daten

Watt: 100
220 V 50 Hz
Sicherung: 2 A
Rütteltisch: 15,5x15,5 cm
Maße: 117x17x11 cm
3,0 Kg

Beschreibung

Leistungstarker Rüttler, stufenlos regelbar.

Wir im Zahntechnischen Bereich eingesetzt, gute Standfähigkeit durch Saug-Gummifüße
Sehr stabil und geräuscharm. Auflageplatte aus Gummi eingerahmt durch eine hochstehende Kante, die das Herunterfallen der Rüttelobjekte verhindert, die Auflageplatte ist leicht zu demontieren und zu reinigen.

Korrosionsfreies durchgefärbtes Gehäuse.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Fa. IP Division GmbH erklärt das
der Rüttler Typ IP Vib 40, Vib 40-1- Vib 40G
den folgenden EG Richtlinien entspricht:

CE 89/392/CE vom 14.6.89 91/368/ CEE vom 20.06.91 93/44/CEE
vom 14.6.93 93/68CEE vom 22.7.93.

Haimhausen 01.01. 2007

IP Division GmbH



- 1) Ein/Aus Schalter, Stufenloser Regler
- 2) Rütteltisch
- 3) Saug-GummifüÙe
- 4) Sicherung 2A